

# Vorher durchlesen!!! Wichtig!!! Vorher durchlesen!!! Zusammen mit den Eltern durchführen!!!

## Information zur Anwendung der Selbsttests

Xiamen Boson Biotech – Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test

Stand: 7.04.2021

1. Schnäuze dir vor der Probenentnahme mehrmals die Nase und wasche dir anschließend die Hände.

2. Röhren in den Röhrenständer der Verpackung drücken.



3. Öffne die Extraktionslösung.

**VORSICHT:** Öffne es vom Gesicht weg und achte darauf, dass du nichts von der Flüssigkeit verschüttest. Benutze zum Öffnen der Lösung eine Schere.



4. Drücke den gesamten Inhalt der Extraktionslösung in das Röhren.

**VORSICHT:** Vermeide den Kontakt der beiden Behälter. Achte darauf, dass der Behälter nicht umfällt.



5. Finden den Tupfer in der versiegelten Verpackung vor sich. Finde die weiche, textile Spitze des Tupfers, die nicht mit den Händen berührt werden darf.



6. **Ziehe die Tupferverpackung auf und nimm den Tupfer vorsichtig heraus.**

**VORSICHT:** Versuche, die weiche, textile Spitze des Tupfers nicht mit den Händen zu berühren.

7. Führe den Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch ein. Die Tupferspitze sollte bis zu 2,5 cm tief vom Rand des Nasenlochs eingeführt werden.



Drehen entlang der Schleimhaut im Nasenloch, um sicherzustellen, dass sowohl Schleim als auch Zellen gesammelt werden. Drehe den Tupfer 5 Mal. Lasse den Abstrichtupfer einige Sekunden im Nasenloch.

Wiederhole den Vorgang mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch.


**VORSICHT:** Dies kann sich unangenehm anfühlen. Führe den Tupfer nicht tiefer ein, wenn du starken Widerstand oder Schmerzen spürst.




8. Führe den Abstrichtupfer mit der Probe in das Extraktionsröhrchen ein. Drehe den Tupfer nun drei bis fünf (3-5) mal. **Lasse den Abstrich 1 Minute im Extraktionspuffer.**



9. Drücke das Extraktionsröhrchen mit den Fingern zusammen und entferne danach so gut wie möglich die Lösung vom Abstrichtupfer, während du den Abstrichtupfer herausziehst und auf ein Einwegtuch legst.

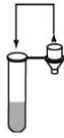


10. Setze die Abdeckkappe mit Tropfaufsatz auf das Extraktionsröhrchen.

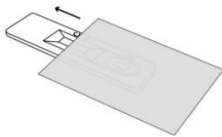

11. Öffne den Beutel und entnimm die Testkassette. Lege die Testkassette auf eine flache und ebene Oberfläche.

**VORSICHT: Nach dem Öffnen muss die Testkassette sofort verwendet werden.**

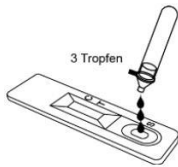

12. Drehe das Extraktionsröhrchen um und gib 3 Tropfen der Testprobe auf die Probenvertiefung, indem du das Extraktionsröhrchen leicht drückst.

**VORSICHT: Die Bildung von Luftblasen in der Probenvertiefung ist zu vermeiden.**




13. Das Ergebnis wird nach 15-20 Minuten angezeigt.

**Vorsicht: Nach über 20 Minuten kann das Ergebnis verfälschen.**

## Deutung der Testergebnisse

### Positiv:

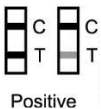

Positive

Ist die Linie bei C und T, ist der Test positiv.

Maßnahmen:

- Selbst-Quarantäne
- Das Kind darf **nicht** in die Schule.
- Es muss ein PCR-Test beim Arzt veranlasst werden.
- Die Schule wird informiert unter: 05943/933351

### Negativ:




Negativ

Ist die Linie nur bei C, ist der Test negativ.

Auch wenn der Test negativ ist, kann es sein, dass man Virus-Träger ist.

### Ungültig:

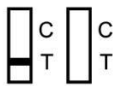

Ungültig

Ist die Linie nur bei C **oder** erscheinen keine Linien, ist der ungültig.

Maßnahmen:

- Die Schule wird informiert unter: 05943/933351
- Das Kind muss in diesem Fall zu Hause bleiben, bis ein Nachtest zu Hause oder in der Schule (erst nach Absprache) erfolgt. Sie schicken das Kind also erst zur Schule, wenn das mit der Schule abgesprochen wurde.

## **Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Nach Hautkontakt	Waschen Sie die Haut mit Wasser ab - sofern Irritationen oder Unwohlsein auftreten, konsultieren Sie einen Arzt/eine Ärztin
Nach Augenkontakt	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen. Unverletztes Auge schützen. Auge weit geöffnet halten beim Spülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Bei Schlucken/Einnehmen	Waschen Sie den Mund mit Wasser aus - sofern Irritationen oder Unwohlsein auftreten, konsultieren Sie einen Arzt/eine Ärztin.